

■ 抗体フォルテシモの装着に関するお知らせ ■

“**抗体フォルテシモ**”は、強毒性の鳥インフルエンザ(H5N1)対策(備蓄等)、並びに新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染しやすい環境(医療機関・企業等)での使用・備蓄を目的に開発されたマスクです。

マスクの優れた密着性を活かすために、ゴムひもを後頭部にまわす装着方法を採用しています。一般的なマスクに採用されている“**耳かけ方式ではありません**”ので、ご注意ください。装着手順は下記のイラストをご参照ください。

なお、通常の季節性インフルエンザ(A香港型・Aソ連型・B型)対策として、また新型インフルエンザ(A/H1N1)対策として、日頃使いをされる方には、耳かけ方式の“抗体マスク サージカルタイプ”のご使用をお勧めいたします。

《 抗体フォルテシモの装着方法 》

装着方法 FITTING INSTRUCTIONS



図の様にマスクを水平に持ちます。

Have a respirator horizontally like a figure.



ノーズピースを上にして、マスクを顔に当て、下側のしめひもを首の後に回して下さい。

Put a respirator on your face and pull the lower headstrap over the head below your ears.



上側のしめひもを後頭部上方に回して下さい。

Pull the upper headstrap onto the back of your head above your ears.



両手の指でマスク鼻部分が鼻に密着するよう、ノーズピースを軽く押しつけて下さい。

Press softly a nosepiece to fit the respirator edges snugly around the nose.



マスクを手で覆い、通気をさえぎり、大きく息を吐いて、マスクと顔の接触部からの漏れがないことを確認して下さい。

Cover the respirator by hands shutting the ventilation and exhale strongly. Check if you don't have air leaks around the respirator edges on exhaling.